



medemagruppen



## **Medema Norge AS**

Stamveien 6  
Postboks 133  
1483 Skytta

Telefon: 67 06 49 00  
Faks: 67 06 49 90



## Innholdsfortegnelse

<b>Innledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Betegnelser - knapper</b> .....	<b>5</b>
<b>Betjening</b> .....	<b>5</b>
Slå på/av klokke .....	6
Stille inn hastighet .....	7
Justere sete, rygg og beinstøtter .....	8
Slå på/av lys .....	9
Stille inn skjermlys .....	9
Stille inn skjermmiljø .....	10
Stille klokke .....	11
<b>Feilkoder</b> .....	<b>12</b>
<b>Ekstra</b> .....	<b>14</b>




## Innledning

DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde menystrukturen fører den brukeren fram til målet.

God fornøyelse.




## Betegnelser - knapper

Dynamic DX2 AJR		
	1	Start-/stoppknapp
	2	Blinklys venstre
	3	Blinklys høyre
	4	Funksjonsvelger
	5	Display
	6	Hastighetsvelger
	7	Tilbehørsvelger
	8	Horn

## Betjening

Øverst i displayet vises statusbjelken. Batteriindikatoren vises hele tiden. Klokken kan slås av og på etter eget ønske. De andre ikonene lyser når tilhørende funksjon er aktiv.

	
	1      2      3      4      5      6
1	Batteriindikator Grønn = fulladet Gult = minst halvfullt Rød = nesten tomt - lad nå!
2	Blinklys venstre er aktivt Ved nødblink blinker begge ikonene
3	Lyset er tent
4	Feilkode - se avsnitt om feilkoder
5	Blinklys høyre er aktivt Ved nødblink blinker begge ikonene
6	Aktuell tid

## Slå på/av klokke



Trykk på pil opp/ned eller joystick (press forover) til ikonet ovenfor vises i midten.



Bruk "funksjonsvelgeren" til å skifte mellom X og ✓.

Godta med et trykk på pil opp/ned.


## Stille inn hastighet

Ved aktivering av joysticken vises bildet under i displayet. I midten vises hastigheten brukeren har valgt som maks. hastighet. Hastighet velges ved å trykke på pluss/minus. Høyeste hastighet er 5, laveste hastighet er 1.



De nederste funksjonene velges med knappen "funksjonsvelger".

## Justere sete, rygg og beinstøtter

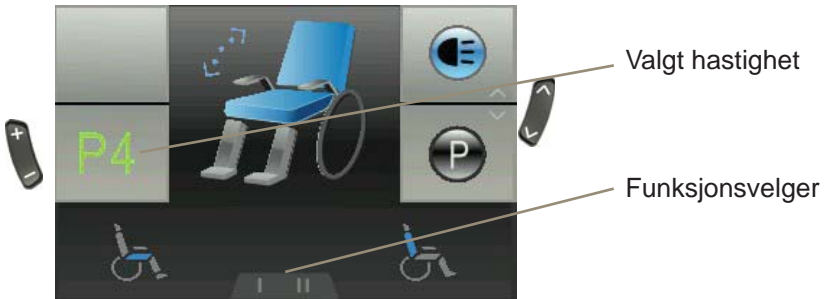

Trykk på pil opp/ned til bildet viser stolen. Bruk "funksjonsvelgeren" til å velge den funksjonen som skal endres. Bruk joysticken til å endre f.eks. vinkelen på seteryggen.


Funktion	Ikon
Vippefunksjon	
Ryggvinkel	
Seteheis	
Venstre beinstøtte	

Funktion	Ikon
Høyre beinstøtte	
Fotstøtter begge	
Liggende	
Nakkestøtte	

Kun de tilgjengelige innstillingene blir vist.



## Slå på/av lys

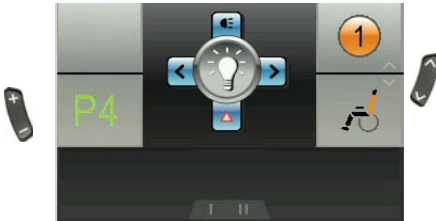


Trykk på pil opp/ned til ikonet for lys vises i midten.

Press deretter joysticken forover for å slå på lyset. Press den forover igjen for å slukke lyset.

Press joysticken bakover for å aktivere nødblinsk. Det slukkes på samme måte.

Press joysticken til høyre eller venstre for å aktivere blinklys. Det slukkes på samme måte.

## Stille inn skjermlys

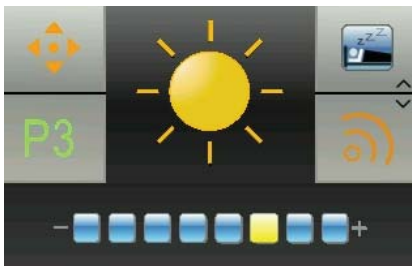


Trykk på pil opp/ned til solen vises i midten. Press joystick forover for å få fram innstillingene. Bruk deretter knappen "funksjonsvelger" eller joystick høyre/venstre for å endre lysstyrke.

Joystick forover/bakover eller pil opp/ned godtar de nye verdiene og går tilbake til hovedmenyen.

## Stille inn skjermmiljø

Trykk på pil opp/ned til ikonet "dag/natt" vises i midten. Press joystick forover for å velge innstillinger. Bildet under vises.

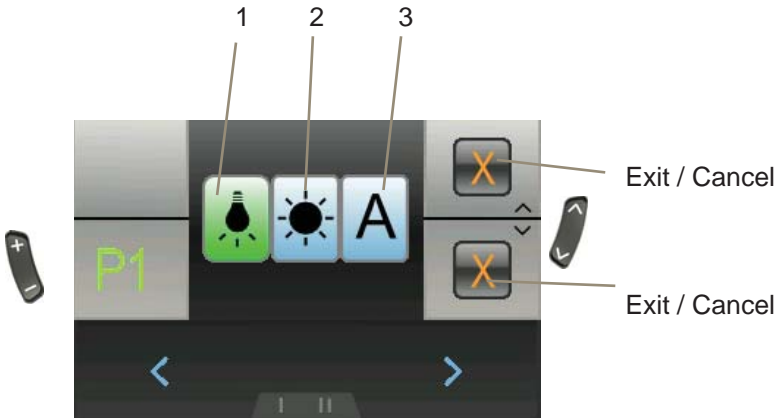

Opsætning	Resultat
1 - Innendørs	Skjermen har svart bakgrunn
2 - Utendørs	Skjermen har hvit bakgrunn
3 - Automatisk	Skjermen skifter bakgrunnsfarge (svart/hvit) avhengig av lyset i omgivelsene

Bruk "funksjonsvelgeren" eller joystick mot høyre/venstre for å velge innstilling.

Joystick forover godtar de nye innstillingene og går tilbake til hovedmenyen.


Joystick bakover eller pil opp/ned annullerer de nye innstillingene og går tilbake til hovedmenyen.



## Stille klokke



Trykk på pil opp/ned til klokken vises i midten. Press joystick forover for å velge innstillinger. Bildet under vises.

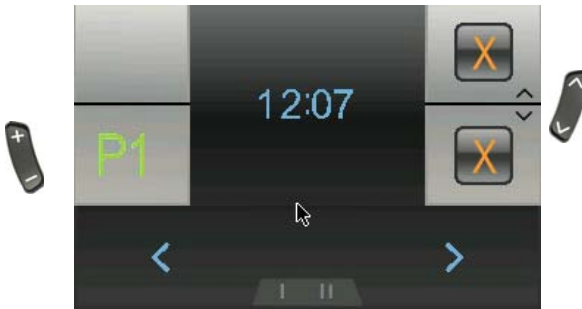

Bruk "funksjonsvelgeren" eller joystick mot høyre/venstre for å velge tallet som skal endres.

Joystick forover teller oppover.

Joystick bakover godtar ny innstilling og går tilbake til hovedmenyen.

Pil opp/ned annullerer ny innstilling og går tilbake til hovedmenyen.

## Systemlås



### Låse DX-systemet



Hold på-/avknappen inne i 4 sekunder mens systemet er på. Systemet lukkes nå i låst tilstand.

### Låse opp DX-systemet



Trykk på på-/avknappen. Systemet viser en lås i displayet.



Trykk på hornet to ganger innen 10 sekunder. Systemet starter som normalt.

## Feilkoder

Kode	Årsag	Betydning
1	DX Modulet	<p>Kan bety:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- feil i programmering</li> <li>- feil i ledningsforbindelse</li> <li>- intern feil i en modul</li> </ul> <p>Slå stolen av og på. Hvis det ikke virker, kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).</p>
2	DX Accessory	<p>Kan bety:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kjører langsomt pga. hevet sete (programmering). Ikke en feil.</li> </ul> <p>Senk setet til laveste posisjon. Hvis det ikke virker, kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).</p>



Kode	Årsag	Betydning
3	Motor 1 / L (M1)	Kan bety: - løs forbindelse mellom motor og strømmodul - kortslutning  Kontroller at ingen kontakter er løse. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).
4	Motor 2 / L (M2)	Kan bety: - løs forbindelse mellom motor og strømmodul - kortslutning  Kontroller at ingen kontakter er løse. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).
5	Parkerings- bremse 1 (M1 venstre)	Kan bety: - løs forbindelse - kortslutning  Kontroller at ingen kontakter er løse. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).
6	Parkerings- bremse 2 (M2 høyre)	Kan bety: - løs forbindelse - kortslutning  Kontroller at ingen kontakter er løse. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).

### Merk!

Hvis termoswitchen har vært slått av skal joysticken slås av og på 2 ganger før alle funksjoner igjen er tilgjengelig. Gjøres på følgende måte.

- Slå på joysticken.
- Vent 10 til 15 sekunder
- Slå av joysticken
- Slå på joysticken

Nå skal alle funksjoner være tilgjengelig igjen.



## Ekstra

DX2-joysticken kan ved hjelp av et DX Infra-red Interface Transmitter System betjene alt elektronisk utstyr som kan betjenes via fjernbetjening med infrarødt lys. Det kan være tv, radio, pc-mus og andre ting.

Tilbehør som gjør det mulig:

### DX-IRIS2 Infra-red Interface Transmitter System

Monteres på stolen og kan kommunisere med infrarødt utstyr, f.eks. tv, radio eller pc-mus.

### DX-MTX Infra-red Mouse Transmitter

Monteres på stolen og kan kommunisere med infrarød pc-mus. Gjør det mulig å navigere musen på en pc-skjerm ved hjelp av joysticken. Se under.



Trykk på pil opp/ned for å finne musikonet. Så lenge musen er blå, er den ikke aktiv. Aktiver den med joystick forover. Dermed blir musen grønn.



Bruk joysticken til å flytte musen rundt på pc-skjermen.



Bruk "funksjonsvelgeren" til å klikke med musen. Det fungerer på samme måte som med musen. Avhengig av innstillingene i pc-en er det mulig med enkeltklikk og dobbeltklikk.

Deaktiver musen igjen ved å trykke på pil opp/ned. Ny funksjon kan nå velges.



**medema**gruppen